

# Tutoriel Transfert d'imagerie

Dernière mise à jour : 11.12.2020





# Nouveau Transfert d'imagerie

**acetiam** Connect | Télédossiers | Examens

11 déc 2020 - 10:15  
Routine | En cours de création

**Patient**

Nom :   
Prénom :   
Né(e) le :   
Sexe :   
Identifiant :

**Expéditeur**  
Télédossier visible par :

**Correspondants**  
Sélectionner... Invitation

**Demande** | Brouillon enregistré automatiquement

Commentaire :

Examens DICOM | Ajouter... Créer...

Documents joints | Ajouter...

Brouillon enregistré automatiquement | **Envoyer** Annuler

**Demandeur**

Sélectionnez ou invitez un/des correspondant(s)

Insérez au moins un examen pour pouvoir un envoyer le dossier\*

\* Lors de la sélection d'un examen existant, l'identité du patient portée par l'examen est automatiquement renseignée dans le bloc d'identité patient du télé dossier



# Accusé de réception du transfert



acetiam Connect

Télédossiers

Examens



Urgen1 Urgentiste1

## Transfert d'imagerie

Créé le

11 déc 2020 - 10:53

Routine

Demande reçue

## ORTIF-DEMO-3 Pascal

Né(e) le : 19 juin 1971

Sexe : M

Identifiant : ORTIFDEMO399999

## Documents joints (1)

CT\PR 27 mars 2013

3 séries, 53 images

## Correspondants

CARPENTRAS - Neurologie  
OVH - PPD - NXS-M-1

MANOSQUE - Urgence  
OVH - PPD - NXS-M-1



Expert

Ajouter une étape



Au nom de la communauté MANOSQUE - Urgence

Ajouter un accusé de réception

Accusez réception du transfert d'imagerie\*

Dema

Commentaire

Pour ajout au dossier patient

11 déc 2020 - 10:53

Documents joints

CRANE - CT\PR - 27 mars 2013

ORTIF-DEMO-3 Pascal

53 image(s)

8.31 Mo



*\* Cette action informe le demandeur de la bonne réception des éléments et clôture automatiquement le télé dossier. En l'absence d'accusé de réception, le télé dossier est automatiquement clôturé au bout de 2 mois.*